

# AD-6209PBT-C 操作説明書

## 1. 仕様

搭載機能	型名	AD-6209PBT-C
風袋引き測定		○
衣服引き測定		○
BMI 計算		×
前回値表示		×
時刻表示		○
人感センサ		○


## 2. 操作方法

### 2.1. Bluetoothの接続を始めて行う前に

Bluetoothの受信機器に最初に接続する場合には、ペアリング操作が必要になります。

本器ではACアダプタを接続すると自動的にペアリングおよび時計設定状態になります。以下の手順で操作を実施してください。

- (1) 本体にACアダプタを接続します。
- (2) バーとともにPrが表示され、AD-6209PBT-Cはペアリング状態になります。

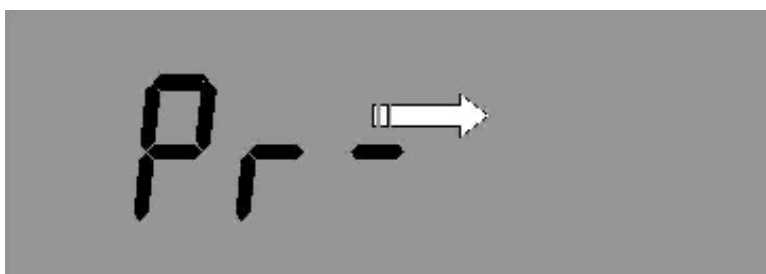

- (3) 接続相手のBluetooth機器の取扱い説明書に従い、ペアリングの操作を実施してください。
- (4) 一分間経過した後、発見可能な状態は解除されます。ペアリングの操作が間に合わなかった場合は、再度(1)から手順を繰り返してください。
- (5) 一分間経過するか、ON/OFFスイッチを押すと、ペアリング結果が表示されます。成功するとPr OKと表示されます。



ペアリング成功の場合


- (6) ペアリング操作が終了すると表示にClOck → Get → — → OKと表示されたあと、月日が画面に現れ、時間が更新されます。

本製品は、セキュアシンプルペアリングに対応しています。セキュアシンプルペアリングに対応していない接続相手のBluetooth機器では、ペアリングの際にPINコードを要求される場合がありますので、その場合は、接続相手の機器側で“123456”を入力してください。


## 2.2. 体重のはかりかた

### 手順：

1. ACアダプタを接続してください
2. **ON/OFF**スイッチを押して測定ONにします。

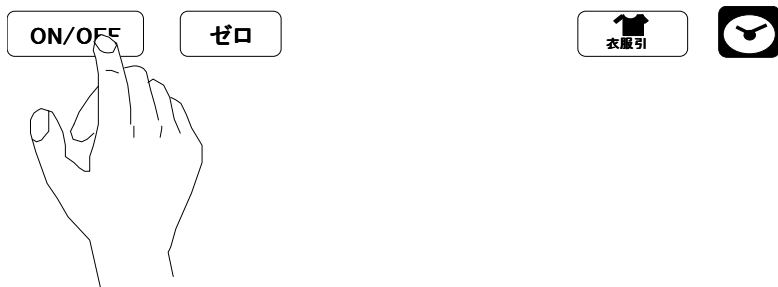

3. 全点灯表示後、“0.00 kg”表示と安定マークが点灯します。“0.00 kg”表示になっていない場合は、**ゼロ**スイッチを押してください。

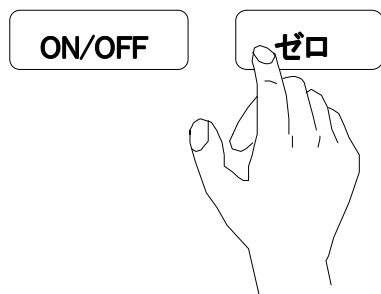


4. 計量台に載ります。
5. 体重が安定すると「安定」と「表示固定」の表示が点灯します。




6. その後体重値が約5秒間点滅表示されますので、一旦体重計から下りてください。その間に受信機器へ表示された体重

値が Bluetooth モジュールにより送信されます。

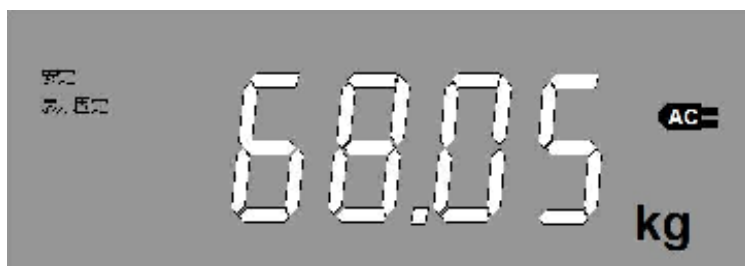

体重 68.05 kg

7. 通信が終了しバーが左から右へ移動した後、再び0.00kgが表示されるの確認してから、次の方の測定を開始してください。

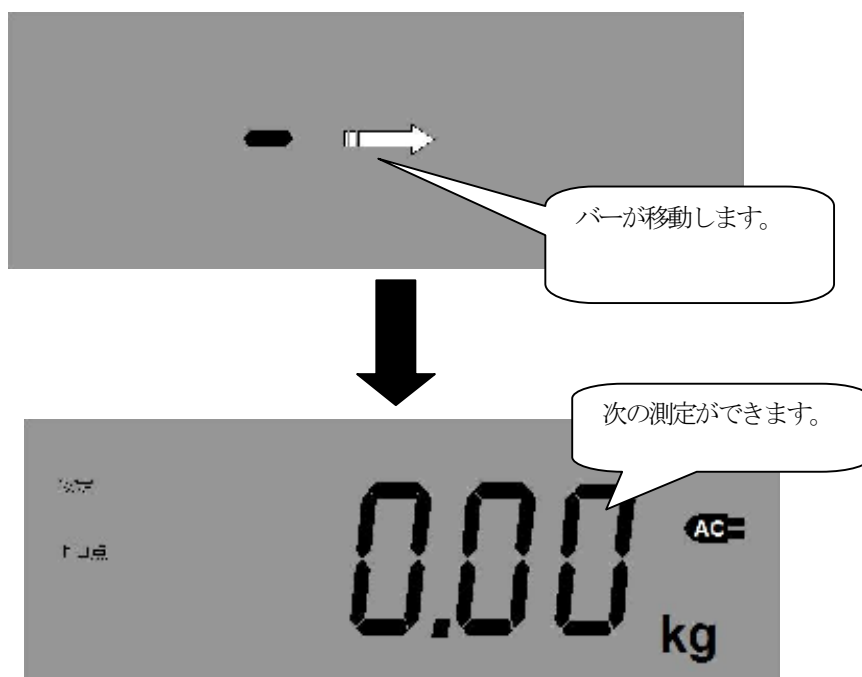

**ご注意** 以下の場合、体重データが送信されません。

- ・最初の体重値を送信後、体重計からおりないとき、、、
  - ・最初の体重値を送信後、0.00 kgが表示される前にすぐ体重計にのったとき、、、
- 必ず一度 0.00kg の表示を確認してから、次の体重をはかってください。**

## 2.3. 衣服の重さを引いてはかる（プリセット風袋引き測定）

- ・通常の体重と同様に送信されます。操作方法は製品の取扱説明書ご参照ください。

## 2.4. 乳幼児の体重を量る（実風袋引き測定）

- ・通常の体重と同様に送信されます。操作方法は製品の取扱説明書ご参照ください。

## 2.5. 設定時刻を表示する

手順：

- (1) 測定状態で、時計マークのスイッチを押してください。
- (2) 画面に現在の時間と分が表示されます。

## 2.6. 設定時刻を更新する

手順：

- (3) 画面が消えている状態で、時計マークのスイッチを2秒以上押してください。
- (4) 表示に CLoCk → Get → — → OK と表示され、時間が更新されます。